


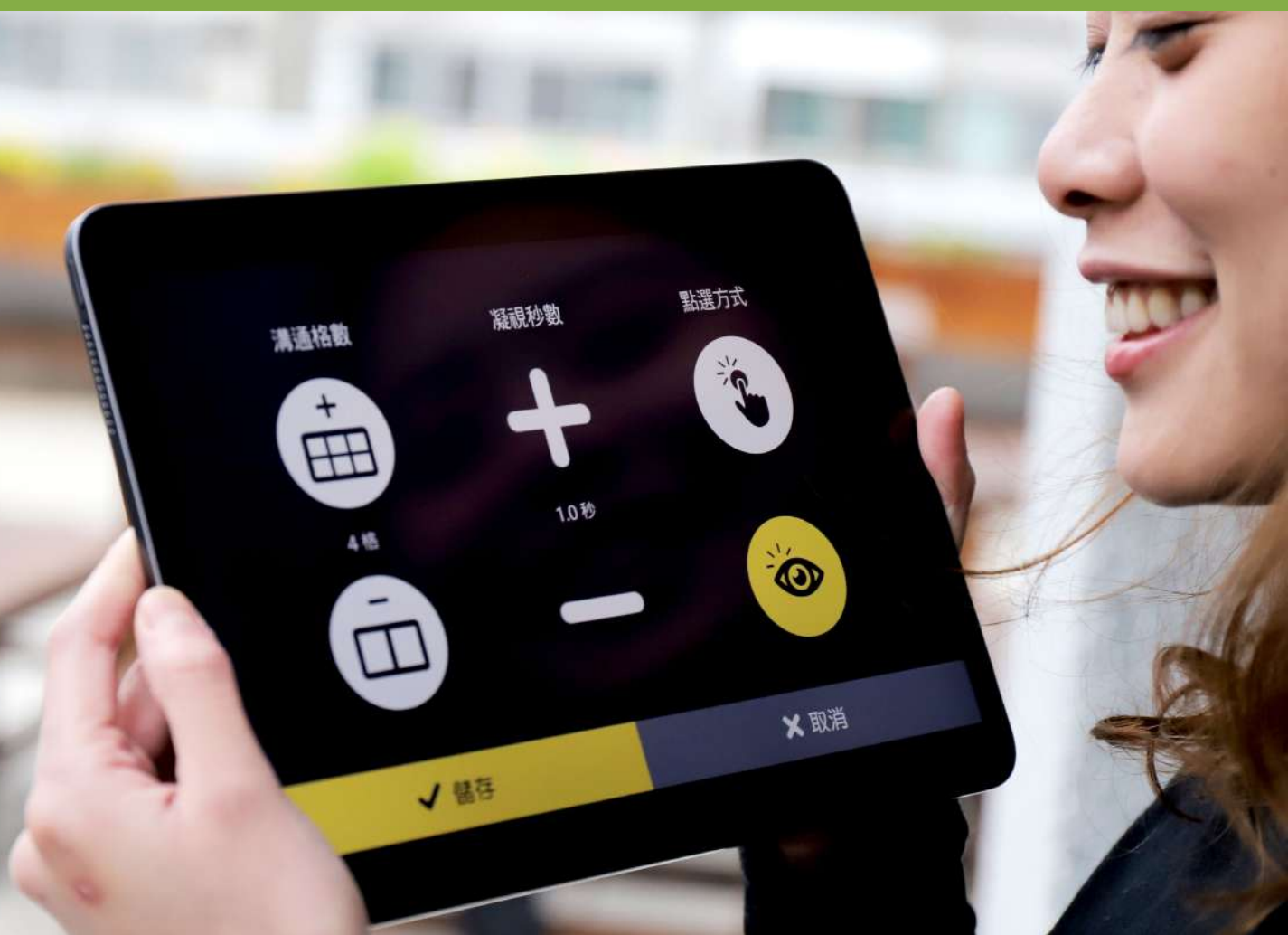

SenseTalk

眼動 AAC 溝通 軟體使用手冊



目 錄

一 . 開始使用	01
二 . 認 識 介 面	02
01. 設 定	02
02. 使用溝通主題	05
03. 編輯主題	09

軟體安裝流程請詳閱安裝手冊。安裝手冊應與產品使用手冊於銷售時提供，或可上官網客服索取 www.senseet.com



一、開始使用

SenseTalk 眼動 AAC 溝通為全球圖卡範圍最大的視覺化輔助溝通系統（Augmentative and Alternative Communication, AAC），有別於傳統 AAC 專為手部功能較佳的障礙者設計，SenseTalk 可自訂格數，克服圖卡範圍過小不易選取操控的問題，搭載智慧型滾輪方便快速組織圖卡，讓您的視線範圍一覽無遺。可作為家人專屬的語音朗讀助理，替他流暢地表達心意。

※ 注意事項 ※

此軟體只支援 tobii dynavox 眼動硬體。

建議電腦規格：

作業系統：Windows 11

處理器：Intel i5 / i7 / i9 第 9 代 · 同等效能或此效能以上之處理器。

記憶體：16GB 以上

電腦連接孔：TYPE C 或 USB 2.0 以上

適用所有肢體及學習障礙患者，如：

ALS 運動神經元疾病（漸凍症）／Cerebral Palsy 腦性麻痺／Muscular Dystrophy 肌肉萎縮症／Spinal Cord Injury (SCI) 脊髓損傷／Traumatic Brain Injury (TBI) 頭部外傷／Stroke 中風／Spinal Muscular Atrophy(SMA) 脊髓性肌肉萎縮症／Hereditary Spastic Paraplegia (HSP) 遺傳性痙攣性下身麻痺

軟體教學影片



二、認識介面

點選開啟 SENSETALK 軟體程式，首先看見主選單畫面。



十大生活主題圖卡

軟體附贈十大生活主題圖卡，包含：動物、顏色形狀、生活常規、情緒／問候、食物、地點、稱謂／職業、身體／生理、人稱／代詞，時間等。方便詞彙累積，亦可精準傳遞身體部位的不適。



編輯

針對需求，建立常用溝通主題或學習主題。



設定

可依據使用者溝通能力設定軟體功能。



關閉

離開應用程式

一、設定功能

依據使用者溝通能力設定軟體功能，點選主選單右側的【設定】按鈕進入設定畫面。



溝通格數

點選按鈕以調整畫面中每列顯示的格數。



★
眼控能力較佳可增加格數。

凝視秒數

設定凝視時間長短。秒數越長，使用者注視選取的物件時間就越久，但使用者眼睛會較疲累；秒數短，可以快速選取所要的字詞物件，但容易誤選物件，請耐心協助調整所適合的秒數。



點選方式

可切換眼控選取或按鍵選取。按鍵選取可讓使用者在凝視電腦畫面時，以外接按鍵點選執行，減輕眼睛凝視負擔。



設定完畢點選【儲存】。



二、使用溝通主題

主選頁面預設是內建的十項主題圖卡，使用者可從主題中選擇溝通的字詞，也可自行編輯建立新主題。



往下看其他主題選單

★
智慧型滾輪操作，眼睛朝螢幕下方看，可往下滾動選單。往螢幕上方看，便可以將選單上拉。

組合溝通字詞

下方將示範如何使用本軟體，請引導使用者利用內建主題或自行建立常用字詞，進行溝通。

例句：我的腳麻

Step.1 在主選單畫面中，將清單下拉（視線凝視畫面下方啟動智慧型滾輪），看見【人稱代詞】選單。




Step.2 凝視【人稱代詞】切換進選單。




Step.3 進入【人稱代詞】選單後，選擇要的字詞，被選擇的字詞會出現在上方輸入框中。接著凝視右下角【返回】按鈕返回上一層選單，進行其他選擇。



Step.4 返回主選單後，選擇【身體 / 生理】選單。

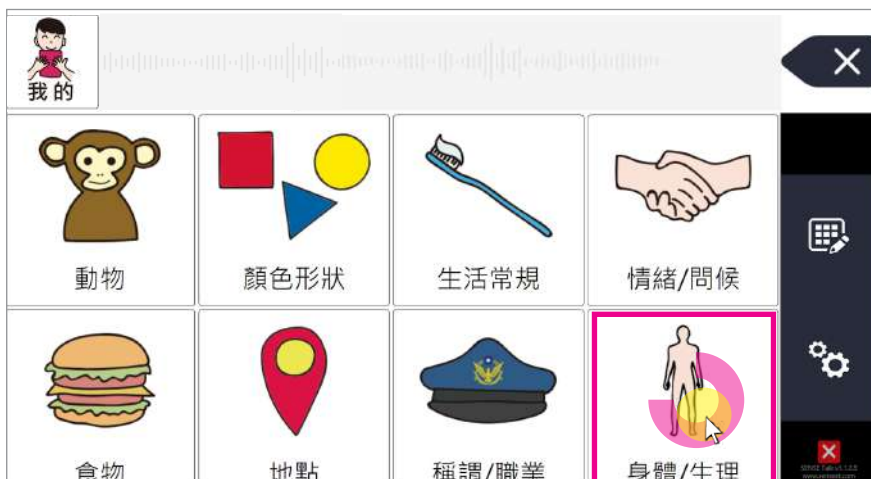

Step.5 在【身體 / 生理】選單中，依序選擇需要的字詞，
這樣例句：我的腳麻，便完成了。

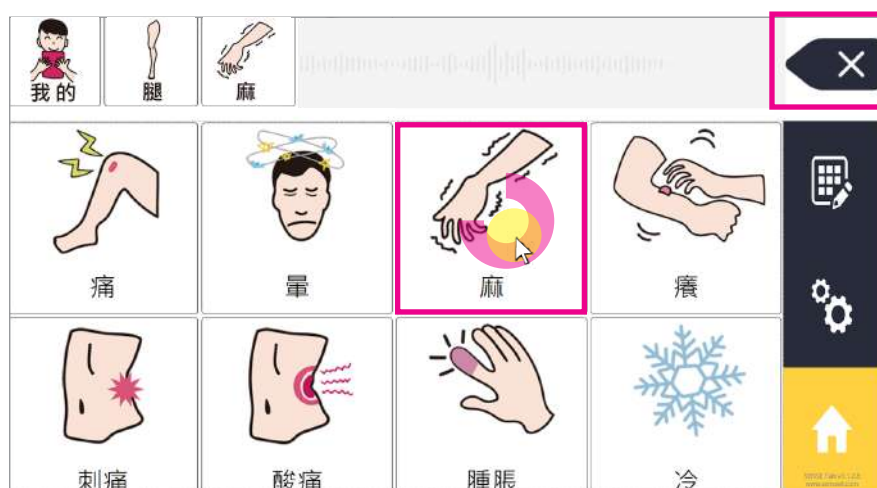

若選錯字詞，請點選右上的【刪除】進行修改。

Step.6 整段句完成後，凝視上方的灰色段落，軟體會語音
播放整段句子。



三、編輯主題與字詞圖卡


除了內建的溝通主題，照護者也可針對需求建立新主題，並在主題下新增字詞圖卡，將清單中把比較常用到的字詞放在上方。

建議使用方式：


1. 把相關的主詞動詞放在同一個主題的清單。方便表達，不用跳換很多個清單。
2. 建立常用字詞清單，例如 "我想要"。
3. 在使用者選取主題中，搭配高頻率相關字詞，例如選取學校主題後，下方便跳出老師、同學、作業等字詞。

編輯主題

Step.1 在主選單中選擇右方【編輯】圖示進入編輯模式。

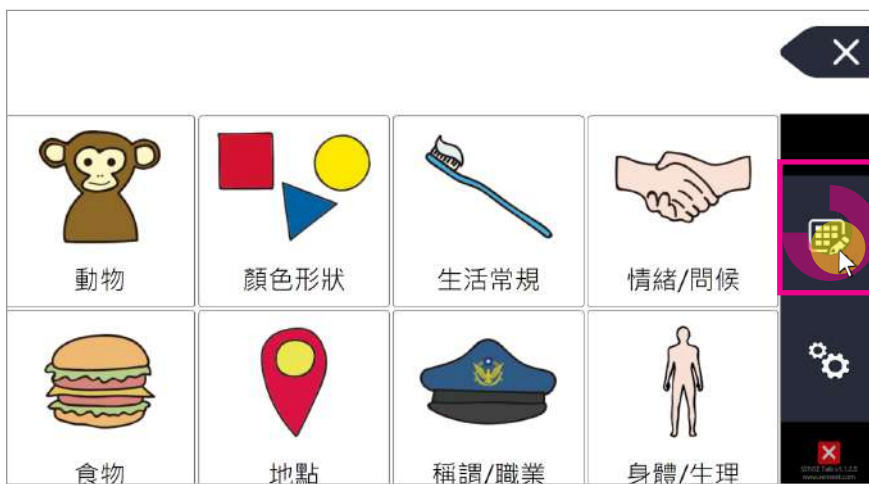

Step.2 進入編輯模式，接著請找到畫面最下方的【+】圖示，點擊開啟新增功能。

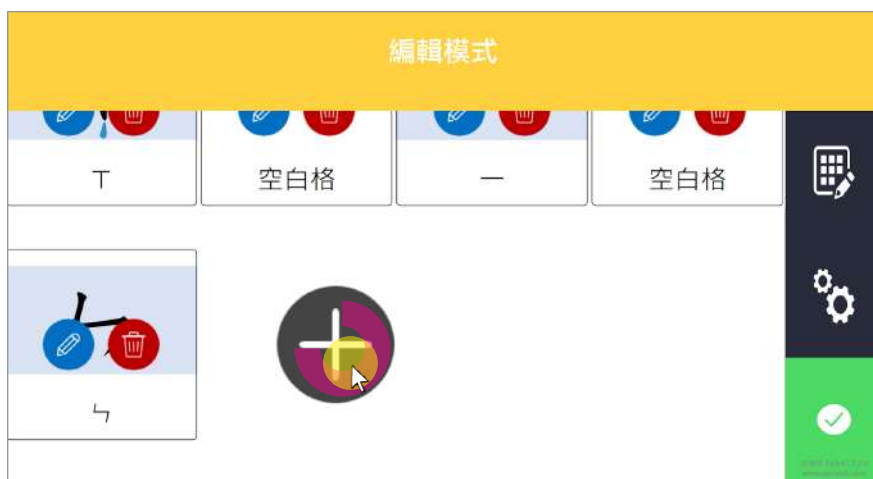

Step.3 畫面跳出灰框，請輸入主題名稱及主題圖片，完成後再按下【儲存】，完成新增主題如「常見用語」或「特定教學主題」的分類。



輸入主題名稱。

載入字詞圖卡。


★ 若缺少主題名稱或圖片，系統將跳出「無法儲存」的提醒通知。

編輯主題中的字詞圖卡


Step.1 在主畫面，點選要進行編輯的主題。




Step.2 進入主題後，點選右側【編輯】圖示進入編輯模式，可對主題內的圖卡進行新增、編輯。

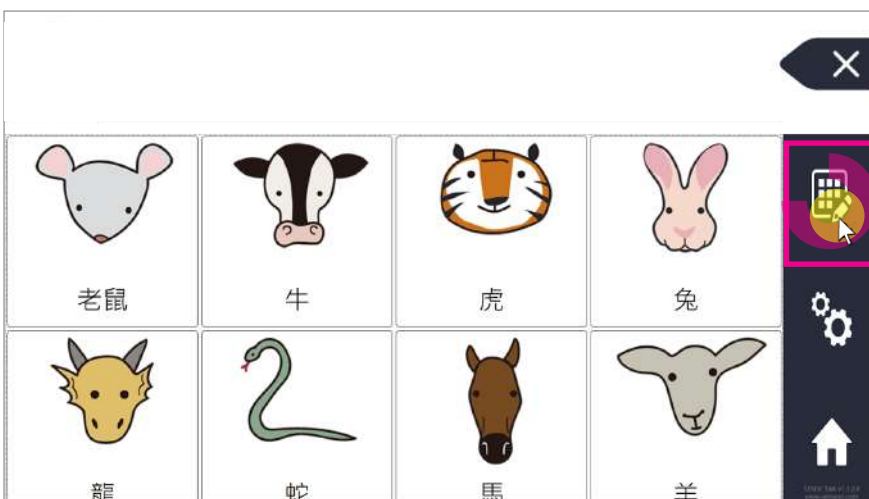

Step.3 進入編輯模式，請找到畫面最下方的【+】圖示，點擊開啟新增功能。

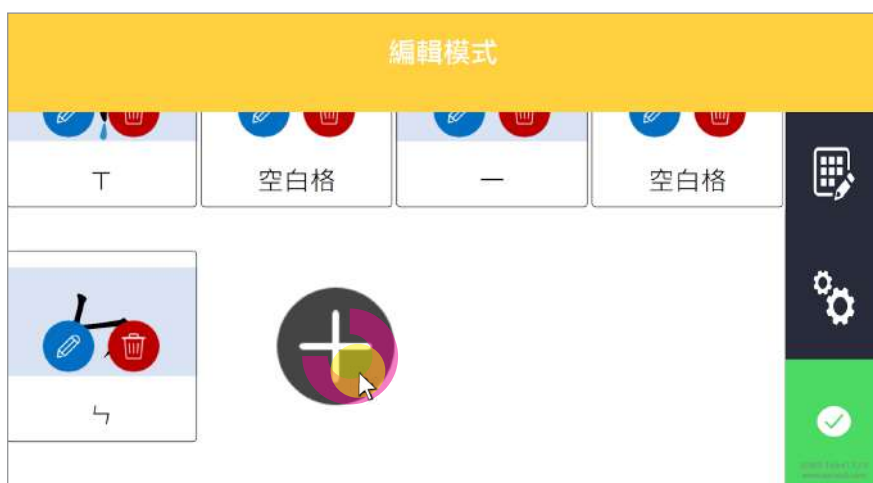

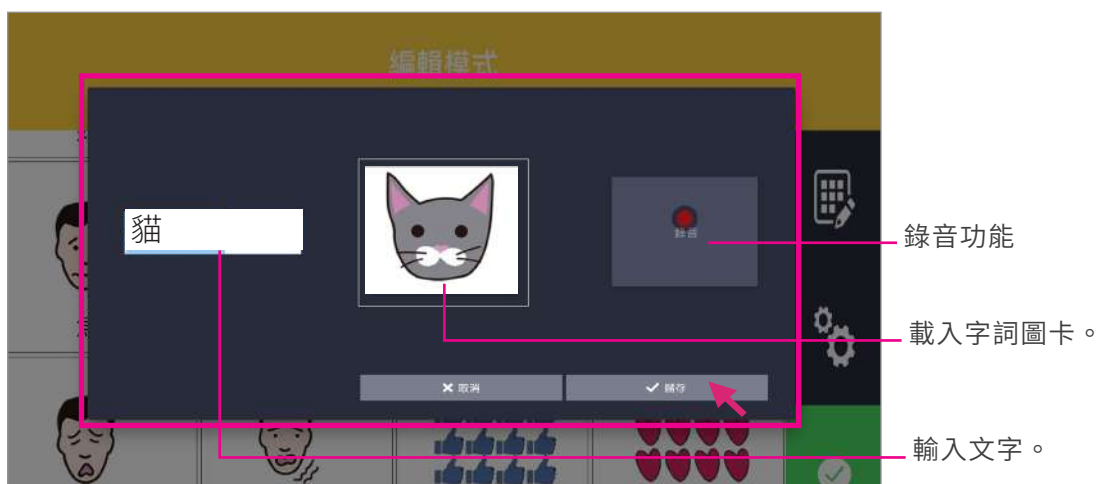

Step.4 畫面跳出灰框，可從電腦中選擇欲匯入的字詞圖片，圖片的發音可由輸入文字後自動轉語音，或從右側錄音功能，錄製字詞圖卡的發音內容，完成後按下【儲存】。



Step.5 過程中若匯入錯誤，可點選圖片上方的【編輯圖片】選項重新進入編輯模式，或點選該圖片上方的【刪除圖片】移除該張字詞圖卡。



 編輯圖片
進入圖片編輯模式

 刪除圖片
移除主題內的單張圖片

若有更多學習需求，請上森思眼動官網了解更多。



森思眼動官網
www.senseet.com



森思眼動
SENSE INNOVATION

Tel +886 2 87861196 | Fax +886 2 87865817

100 台北市中正區博愛路 224 巷 5 號 2 樓之 1

service@senseet.com